



# SANOSIL

DISINFECTANTS FOR LIFE 



# Sanosil S006

Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel  
für die Flächendesinfektion

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

# Sanosil S006

Desinfektionsmittel für  
die Flächendesinfektion



...Ideal für Oberflächen mit erhöhten Hygienean-  
sprüchen

- ✔ Gute Wirksamkeit gegen Bakterien, behüllte- und Noroviren, Hefen und Pilze
- ✔ Einfache und sichere Anwendung (gebrauchsfertig)
- ✔ Hinterlässt keine klebrigen Oberflächen
- ✔ Verursacht keine unangenehme Gerüche
- ✔ Ohne Alkohole, Chlor/Chlorverbindungen oder QAV
- ✔ Ohne Farb- und Duftstoffe
- ✔ Mit katalytisch verstärktem Wasserstoffperoxid
- ✔ Wasserstoffperoxid zerfällt 100% zu Wasser und Sauerstoff
- ✔ Über 2 Jahre stabile Lagerhaltung
- ✔ Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

**SANOSIL AG** • CH-8634 Hombrechtikon • Schweiz  
E-mail: [kundeninfo@sanosil.com](mailto:kundeninfo@sanosil.com)  
[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Sanosil S006 ist ein Flächendesinfektionsmittel mit „begrenzt Viruzid Plus“ Testung und Depotwirkung. Es basiert auf der bewährten Sanosil Wasserstoffperoxid/Silber Formulierung und setzt keine brennbaren oder übelriechenden Dämpfe frei. Es ist rund doppelt so stark wie das Flächendesinfektionsmittel Sanosil S003 und eignet sich für Anwendung mit erhöhten mikrobiologischen Anforderungen.

Als Aktivstoff wird Wasserstoffperoxid verwendet, welches zusätzlich stabilisiert und in seiner desinfizierenden Wirkung durch Zugabe von einer minimalen Menge Silberionen katalytisch um ein Vielfaches verstärkt wird.

**Durch dieses Verfahren kann die Desinfektionswirkung um bis zu 800% gesteigert werden.**

Wasserstoffperoxid zerfällt zudem nach der Anwendung komplett zu Wasser und Sauerstoff. Die nach dem Zerfall des Peroxides auf der Oberfläche verbleibenden, geringen Silbermengen verzögern die Keimvermehrung über einen Zeitraum von bis zu 72 Stunden.



## DESINFEKTION: WISSEN AM RANDE

**Hinweis 1:** Unabhängig vom verwendeten Desinfektionsmittel gilt, dass die Desinfektionswirkung stets umso höher ist, als die zu desinfizierende Fläche vorgängig möglichst gründlich gereinigt wird.

**Hinweis 2:** Eine Sprüh-Wisch Desinfektion bzw. die Anwendung mit einem befeuchteten Wischtuch ist einem reinen Aufsprühen deutlich überlegen. Alleiniges Aufsprühen (insb. mit einem Handsprüher) kann Wirkungslücken hinterlassen und soll vermieden werden.



SANOSIL S006



## ÜBERSICHT

**PRODUKT-TYP**  
Gebrauchsfertig

**PASSEND FÜR**  
- Wischdesinfektion  
- Gezieltes Sprühen mit einem Gerät  
- Spezifische Wasserdesinfektion

**WIRKUNG GEGEN**  
Bakterien, Hefen, behüllte Viren / Noroviren (begrenzt Viruzid + ), Pilze

**HALTBARKEIT**  
2 Jahre

**ENTHÄLT**  
3g/100g Wasserstoffperoxid  
0.003g/100g Silber



## Funktionsweise

- 1 Der vom Wasserstoffperoxid abgespaltene Sauerstoff ( $^1\text{O}_2/\text{O}_2$ ) greift die Zellwände der Mikroorganismen an. Durch Oxidation (kalte Verbrennung) werden diese denaturiert und zerstört.
- 2 Unterstützt wird der Effekt durch Silberionen, welche katalytisch die Wirkung des Peroxides verstärken. Zusätzlich blockieren diese den Stoffwechsel (wo vorhanden) und die Vermehrungsfähigkeit der Keime.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Schweiz  
E-mail: [kundeninfo@sanosil.com](mailto:kundeninfo@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



# FLÄCHENDESINFEKTION

Sprüh-Wisch-Verfahren

**Hinweis:** Beim Umfüllen von S006 in Sprühflaschen o.Ä. muss zwingend eine Etikette mit Informationen über den Inhalt auf der Aussenseite des entsprechenden Gebindes angebracht werden. Passende Etiketten sind auf Wunsch bei uns erhältlich.



## SCHRITT 1

Reinigen Sie die zu behandelnde Fläche gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Je sauberer die Fläche, desto besser die Desinfektionswirkung.

## SCHRITT 2

Ziehen Sie Handschuhe an. Befeuchten Sie ein Wischtuch mit unverdünntem Sanosil S006.

**Dosierung auf glatten Oberflächen: 30-50 ml/m<sup>2</sup>**



## SCHRITT 3


Benetzen Sie die zu desinfizierende Fläche mit dem Tuch, so dass ein gleichmässiger, lückenloser, feuchter Film zurückbleibt. Pfützenbildung vermeiden.

**Blieben auf glatten Oberflächen Tropfen oder Pfützen zurück, verteilen Sie diese mit dem Wischtuch.**

## SCHRITT 4

Lassen Sie das Mittel eintrocknen.

**Benötigte Zeit ca. 15 Min.**

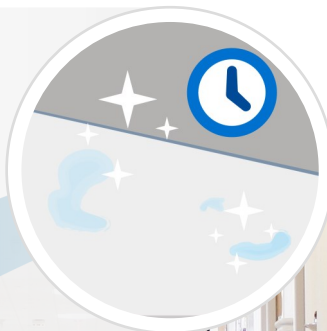

SANOSIL S006



## WIRKSAMKEIT

NORMEN / EINWIRKZEITEN  
(Flächendesinfektion)

### BAKTERIEN

#### Bakterizid:

EN 1276 geringe Belastung: 5 Min\*  
EN 1276 hohe Belastung: 15 Min  
EN 1650 hohe Belastung: 15 Min  
EN 13697 hohe Belastung: 30 Min

### HEFEN

#### Levurozid:

EN 13697 hohe Belastung: 5 Min

### PILZE

#### Fungizid:

EN 1650 geringe Belastung: 30 Min\*

### VIREN

#### begrenzt Viruzid

(behüllte Viren) EN 14476:2019  
geringe Belastung: 5 Min

#### begrenzt Viruzid+

(murines Norovirus, Vaccinavirus)  
EN 14476:2013 + A2:2019  
geringe Belastung: 15 Min

\* Getestet in 50% Verdünnung

**Hinweis:** Beim direkten Sprühen mit einem Gerät soll die Aerosolbildung so gut wie möglich vermieden werden. Bei Anwendungen grösser als haushaltüblichen Flächen muss ein entsprechender Atemschutz (ABEKP3 Filter) getragen werden, um Reizungen der Atemwege zu vermeiden.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Schweiz  
E-mail: [kundeninfo@sanosil.com](mailto:kundeninfo@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



# FLÄCHENDESINFEKTION

mit SanoWipes

SanoWipes sind trockene Wischtücher in einem praktischen Spendereimer mit wieder-verschliessbarem Deckel. Sie werden vor Gebrauch mit Desinfektionsmittel getränkt und sind dann mehrere Wochen einsatzbereit. Getränkte SanoWipes sind ideal für die rasche Zwischendesinfektion kleinerer Flächen.



## SCHRITT 1

Ziehen Sie Handschuhe an. (Grundsätzliche Sicherheitsempfehlung beim Umgang mit Desinfektionsmittel.)

## SCHRITT 2

Entfernen Sie die Schutzfolie der Wipesrolle und platzieren Sie diese im Eimer.




## SCHRITT 3

Tränken Sie die Rolle mit unverdünntem Sanosil S006. **Dosierung 1 – 1,2 l pro Rolle.**

## SCHRITT 4

Ziehen Sie das erste Tuch durch die Spenderöffnung und schliessen Sie den transparenten Deckel gut. Hinweis: durch Lichteinfluss können sich die Wipes mit der Zeit etwas verfärben, dies stellt jedoch keine Qualitätseinbusse dar.

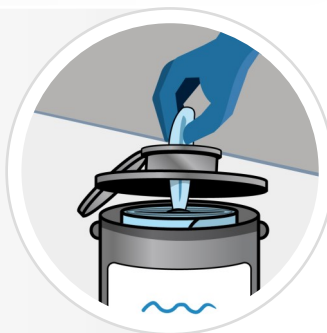

## SCHRITT 5

Entnehmen Sie ein getränktes SanoWipe und wischen Sie die zu desinfizierende Fläche mehrfach gründlich ab. Tragen Sie dabei Handschuhe, um längeren Hautkontakt zu vermeiden.



SanoWipes



## TECH. DATEN

### MATERIAL

PET, optimiert für die Applikation von Flüssigkeiten

### ABSCHNITTE PRO ROLLE

90 Stk

### ABMESSUNGEN DER TÜCHER

36 x 20 cm



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Schweiz  
E-mail: [kundeninfo@sanosil.com](mailto:kundeninfo@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



## BODENDESINFEKTION

mit Sprühmopp

**Hinweis:** Als Alternative zu einem Sprühmoppsystem eignen sich auch vorgewetzte Wechselmoppbezüge. Bei grösseren Flächen (z.B. Sportmatten) bewährt sich zudem die parallele Nutzung von einem Handsprühgerät zum Sprühen und Wischmopp zum Nachwischen.

### SCHRITT 1

Reinigen Sie die zu behandelnde Fläche gründlich mit einem Mopp und einem geeigneten Reinigungsmittel.

### SCHRITT 2

Füllen Sie Sanosil S006 in den Vorratsbehälter eines geeigneten Mopp-Applikationsgerätes.

### SCHRITT 3

Benetzen Sie die Fläche mit dem Applikator, so dass ein gleichmässig feuchter Film zurückbleibt, der in einigen Minuten zu trocknen vermag. Lassen Sie das Mittel einwirken / trocknen.



## DESINFEKTION VON KLEINTEILEN

(Dichtungen, O-Ringe etc.)



### SCHRITT 1

Reinigen Sie die zu behandelnden Teile wenn möglich im Geschirrspüler oder von Hand.

### SCHRITT 2

Füllen Sie Sanosil S006 in ein Gefäss und legen Sie die Teile darin ein. Nach einigen Minuten herausnehmen und trocknen lassen. Sofern das Sanosil S006 nicht verschmutzt wird, kann die Lösung mehrfach verwendet werden.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

**SANOSIL AG** • CH-8634 Hombrechtikon • Schweiz  
E-mail: [kundeninfo@sanosil.com](mailto:kundeninfo@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



# FLÄCHENDESINFEKTION

mit Sprühgerät - für professionelle Anwender

**Achtung:** Bei der Anwendung mit professionellen Sprühgeräten entstehen immer eine gewisse Menge Aerosole, welche die Gesundheit beeinträchtigen könnten. Tragen Sie deshalb bei ausgedehnten Sprüharbeiten stets eine Atemschutz- Vollmaske, um Reizungen der Atemwege und Augen zu verhindern. (Atemschutz mit Gasfilter (gegen Wasserstoffperoxid) Filtertyp: ABEK-P3 (bei uns erhältlich).

## SCHRITT 1

Reinigen Sie die zu behandelnde Flächen gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Je besser die Reinigung, desto effektiver die Desinfektion.

Füllen Sie die benötigte Menge Sanosil S006 in den Tank eines Sprühgerätes (z.B. Sanosil Stream / Stream Compact, Druckspeichersprühgerät mit Pressluftanschluss, Airless Sprühgerät etc.). Ziehen Sie Schutzausrüstung (Vollmaske mit ABEK-P3 Filter und Handschuhe) an.



## SCHRITT 2

Wählen Sie eine möglichst feine Zerstäubungsart und besprühen Sie die zu desinfizierenden Flächen so, dass eine durchgehend leicht feuchte Fläche entsteht. (Vergleichbar mit einem beschlagener Badezimmerspiegel beim Duschen.)

**Richtwert: 30 - 50ml/m<sup>2</sup>**  
**Tropfen/Pfützenbildung und Läufe vermeiden.**

Verhindern Sie, dass während der Sprühnebel-Desinfektion zwangsläufig gebildete Aerosole in Raumteile mit ungeschützten Personen gelangen.



## SCHRITT 3

Lassen Sie das Produkt einwirken. Der Raum soll zur Sicherheit bis zu 2h nach der Sprühdesinfektion nicht ohne Schutzausrüstung betreten werden.

(MAK Wert Wasserstoffperoxid: 1ppm)

Ist der MAK – Wert zu hoch, die Wartezeit verlängern oder gut Lüften. Es darf weder Desinfektionsmittelgeruch noch Reizungen der Atemwege/Augen auftreten.



**Hinweis:** Je feiner die Tröpfchen, desto besser die Benetzung. Vermeiden Sie Tropfen/Pfützenbildung und Läufe durch übermäßigen Materialauftrag. Falls dies trotzdem passiert - vor dem Eintrocknen mit einem Wischtuch nachwischen. Ansonsten drohen Verfärbungen.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Schweiz  
E-mail: [kundeninfo@sanosil.com](mailto:kundeninfo@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)





**SANOSIL AG**

CH-8634 Hombrechtikon, Schweiz

Tel.: 055 254 00 54

E-mail: [kundeninfo@sanosil.com](mailto:kundeninfo@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

**Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf umfangreichen Versuchen. Wir beraten nach bestem derzeitigem Wissen, jedoch insoweit unverbindlich, als Anwendung und Lagerhaltung ausserhalb unserer direkten Einflussnahme liegen. Produktbeschreibungen bzw. Angaben über Eigenschaften der Präparate enthalten keine Aussagen über Haftung für etwaige Schäden.

