



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 



Sanosil Aerosol Desinfektion

Vorgehen

www.sanosil.com

Vor der Vernebelung:



1. Raum vorbereiten

Raum für die Dauer der Desinfektion für die reguläre Benutzung sperren und sicherstellen, dass der Raum für die Dauer der Desinfektion nicht anderweitig benötigt wird.

2. Reinigung und Desinfektion


Raum gründlich reinigen und stärker kontaminierte Flächen wie Kontaktstellen manuell per Wisch-Desinfektion desinfizieren.



3. Raum abschotten

Lüftung/Klimaanlagen ausschalten, Fenster und Raumöffnungen schliessen.


Wenn notwendig: Teleskopabdeckplatten an Lüftungsöffnungen und Rauchmelder anbringen.

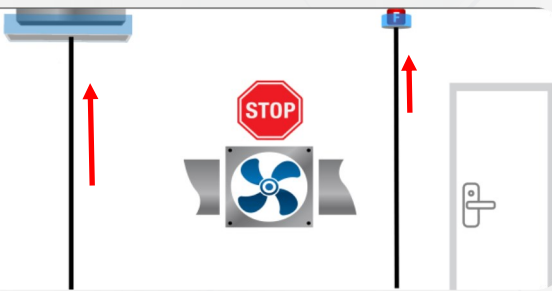

4. Raumvolumen bestimmen

Raumgrösse ausmessen und Rauminhalt in m^3 bestimmen (Länge x Breite x Höhe des Raumes).

Von Mobiliar belegtes Raumvolumen Volumen vom Gesamtvolumen abziehen (Ergebnis wird für die Programmierung des Desinfektionsgerätes benötigt).

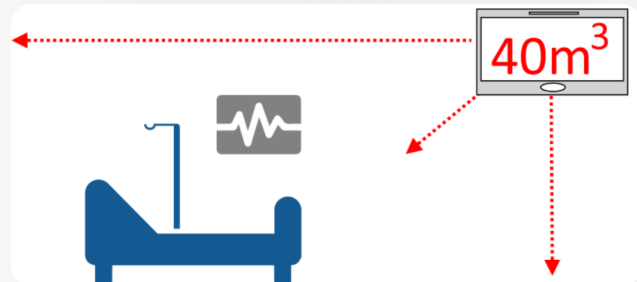

45% rH 22°C



5. Klimakontrolle

Kontrolle der klimatischen Startbedingungen.

Ideal: Relative Feuchte 45-55 %, Temperatur 20-22 Grad Celsius.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Schweiz
E-mail: kundeninfo@sanosil.com
www.sanosil.com




Während der Vernebelung:

1. Gerät platzieren und starten

Aerosolgerät passend platzieren, auf genügend Abstand des Sprühkegels zu Wänden, Decke und Equipment achten.

Sicherstellen, dass sich niemand mehr ausser der für die Desinfektion verantwortliche Person im Raum aufhält.

Gerät befüllen, gemäss Vorgabe programmieren und Startautomatik betätigen. Den Raum umgehend verlassen.

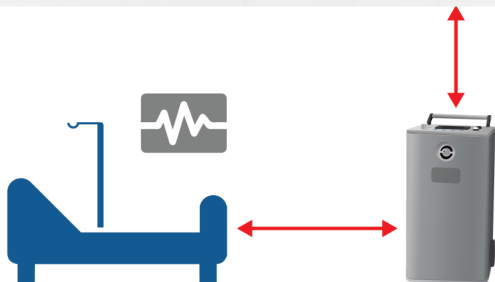

2. Türe versiegeln

Türe nach dem Verlassen des Raumes schliessen und optional Ritzen mit Klebeband versiegeln.



3. Anbringen von Warnsignalen

Hinweisschild mit der Startzeit sowie Mindesteinwirkzeit des Desinfektionsprogrammes anbringen.

Türklinke mit Warntafel versehen, Raum gegen unabsichtliches Öffnen sichern.



4. Desinfektion durchführen

Das automatische Desinfektionsprogramm komplett ablaufen lassen. Während der Desinfektion alle Türen und Fenster geschlossen halten, Klima- und Lüftungsanlagen bleiben ausgeschaltet.



5. Raum verschlossen halten

Raum geschlossen halten und für die Dauer der Vernebelung sowie der notwendigen Einwirkzeit (mindestens 120 Minuten) nicht betreten.




SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Schweiz
E-mail: kundeninfo@sanosil.com
www.sanosil.com



Nach der Vernebelung:

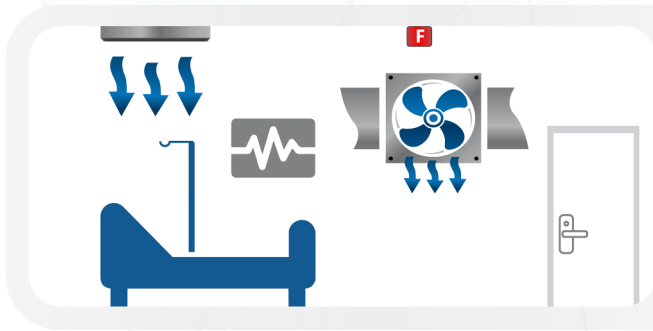


1. Lüftung einschalten

Nach Ablauf der Einwirkzeit allfällig angebrachte Abdeckplatten entfernen und Lüftung wieder in Betrieb nehmen.
(Entfällt in der Regel bei Standzeit über Nacht)

2. Kontrollieren und freigeben

Kontrolle des H_2O_2 Gehaltes in der Luft. Ist dieser innerhalb der gesetzlichen Grenzen, kann der Raum für die erneute Nutzung freigegeben werden.

(Entfällt in der Regel bei Standzeit über Nacht)

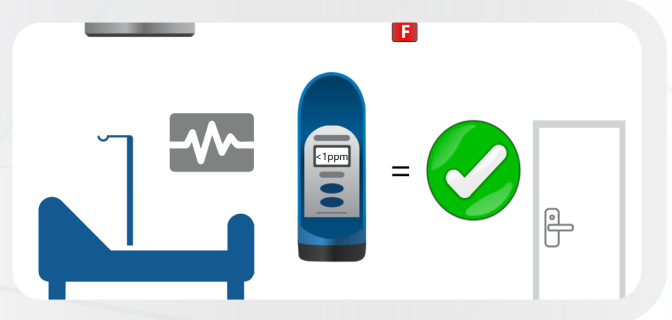

3. Raum wieder nutzen


Den Raum ohne Einschränkungen wieder benutzen.



(4. Aerosolgerät warten)

Aerosolgerät kontrollieren, wenn notwendig reinigen und/oder warten.

Gerät bis zum nächsten Einsatz sicher verstauen.

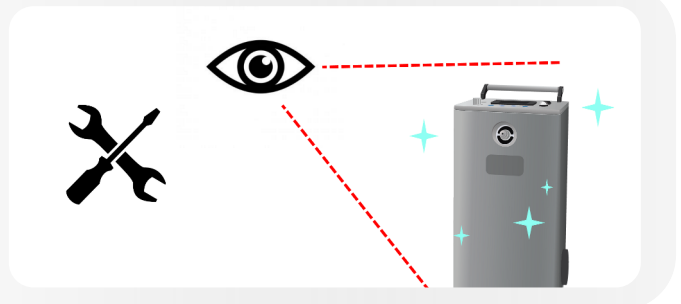

SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Schweiz
E-mail: kundeninfo@sanosil.com
www.sanosil.com

