



# SANOSIL

DISINFECTANTS FOR LIFE 



# SanoClean Forte S

Nettoyant désinfectant  
de surface, concentré

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



# SanoClean Forte S

Nettoyant désinfectant  
de surface, concentré



## ... avec effet de dépôt

Idéal pour traiter les surfaces en milieu  
médical et dans le domaine des services

- ✔ Nettoyage et désinfection en un seul geste
- ✔ Bonne efficacité contre les bactéries, les virus (enveloppés), les levures et les champignons
- ✔ Concentré à diluer
- ✔ Ne laisse pas les surfaces collantes
- ✔ Ne dégage pas d'odeur désagréable
- ✔ Sans alcool, sans chlore / composé chloré ou composé d'ammonium quaternaire
- ✔ Contient du peroxyde d'hydrogène renforcé catalytiquement
- ✔ Le peroxyde d'hydrogène se décompose à 100 % en eau et en oxygène
- ✔ Peut être stocké pendant 2 ans
- ✔ Produit de qualité, de fabrication suisse



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG \* CH-8634 Hombrechtikon \* Suisse  
E-Mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com) \* Web: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)  
[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le nettoyant désinfectant SanoClean Forte est utilisé pour combiner le nettoyage et la désinfection en une seule opération. Un mélange de tensioactifs coordonnés et de composants désinfectants permet d'obtenir, d'une part, un excellent pouvoir d'élimination des salissures et, d'autre part, une désinfection en profondeur grâce à un effet de dépôt.

L'agent actif utilisé est le peroxyde d'hydrogène qui est soigneusement stabilisé et dont l'effet contre les micro-organismes est renforcé de façon catalytique par l'adjonction de 0,0075 % d'argent. **L'action du désinfectant peut ainsi être augmentée d'environ 800 %.** Le peroxyde d'hydrogène se décompose intégralement, après application, en eau et en oxygène. Les quelques traces d'argent qui restent sur la surface après désinfection freinent le développement des germes pendant une période pouvant aller jusqu'à 72 heures.



## DÉSINFECTION : BON À SAVOIR

**Indication 1:** SanoClean Forte peut être utilisé sur tout type de surface (matières plastiques, inox, béton, verre, céramique, pierre, porcelaine, acier chromé, etc.). Sa bonne capacité à dissoudre les graisses en fait un produit particulièrement approprié pour les points de contact comme les mains courantes, les interrupteurs, les poignées de portes, les écrans tactiles, etc.

**Indication 2:** Une désinfection par pulvérisation et essuyage, ou l'utilisation avec un chiffon humide, est nettement plus efficace qu'une simple pulvérisation. Certaines zones peuvent échapper à une simple pulvérisation (en particulier lors de l'utilisation d'un pulvérisateur manuel) et il est donc préférable d'éviter de procéder ainsi.



## EN BREF

### TYPE DE PRODUIT

Concentré

### CONVIENT POUR

Désinfection par essuyage / Sano Wipes / pulvérisation ciblée à l'aide d'un appareil

### EFFICACE CONTRE

Bactéries, levures, virus (grippe A, coronavirus), champignons

### DURÉE DE CONSERVATION

2.5 ans


### CONTIENT

7,5g de peroxyde d'hydrogène et 0,0075g d'argent pour 100g de produit

Solution contenant des tensioactifs

## Mode d'Action:

- 1 L'oxygène dégagé par le peroxyde d'hydrogène ( $^1O_2/^O_2$ ) attaque les parois cellulaires des micro-organismes. L'oxydation (combustion à froid) les dénature et les détruit.
- 2 Cet effet est amplifié par les ions argent qui renforcent l'action du peroxyde grâce à la catalyse. Ces ions argent bloquent également l'activité métabolique (lorsqu'elle existe) et la capacité reproductive des germes.

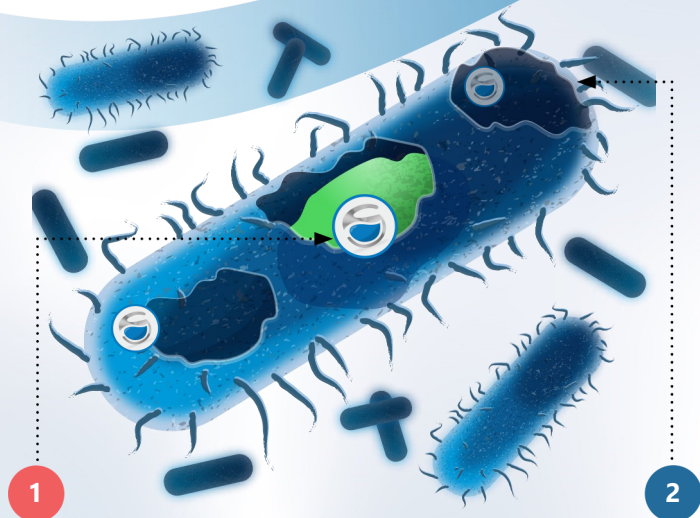

**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG \* CH-8634 Hombrechtikon \* Suisse  
E-Mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com) \* Web: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



# DÉSINFECTION DE SURFACE GÉNÉRALE

Instructions de dilution et mesures de précaution

**Important:** Sanosil S015 est un désinfectant concentré. Sous sa forme concentrée, il peut entraîner des irritations cutanées et/ou de graves lésions oculaires. Il est impératif de porter des protections adaptées pour la peau et les yeux (gants de protection / lunettes de protection).



SanoClean Forte S



## ÉTAPE 1

**Enfilez des gants et mettez des lunettes de protection.**


Avant d'utiliser SanoClean forte S, veuillez lire la fiche de données de sécurité et respecter les indications concernant l'utilisation, le stockage et le transport du produit.



## ÉTAPE 2

Mélangez (pour des tâches de désinfection standard) 1 dose de SanoClean Forte S avec 4 doses d'eau déminéralisée \* = solution à 20 %.

\* Il est également possible de prendre de l'eau du robinet non traitée, mais une telle solution doit être utilisée sous 48 h pour des raisons de sécurité.

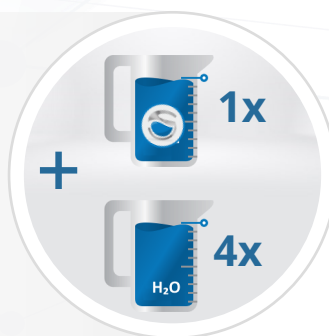

## Précautions d'emploi importantes pour le SanoClean Forte S

Si vous avez renversé du SanoClean Super S, essuyez-le avec une lingette synthétique et rincer-la aussitôt abondamment à l'eau. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas reverser le SanoClean Super S dans le bidon une fois qu'il a été prélevé.



## ÉTAPE 3

Versez la solution dans un récipient propre en plastique à l'abri de la lumière. Veillez à ce que ce récipient ne soit pas complètement hermétique, de façon à pouvoir laisser s'échapper, par surpression, l'oxygène qui se sera formé. Inscrivez la date et le contenu sur le récipient.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

**SANOSIL AG** \* CH-8634 Hombrechtikon \* Suisse  
E-Mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com) \* Web: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)  
[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



# DÉSINFECTION DE SURFACE

Procédé par pulvérisation et essuyage

**Indication:** Lorsque vous transvasez SanoClean Forte dans des pulvérisateurs ou autres récipients similaires, il est impératif d'appliquer une étiquette sur le contenant donnant des informations sur le produit présent à l'intérieur. Les étiquettes correspondantes sont disponibles sur demande auprès de nos services.




## ÉTAPE 1

Nettoyer la surface à traiter de toute saleté non adhérente. Plus la surface sera propre, plus la désinfection sera efficace.

## ÉTAPE 2

Enfilez des gants. Humidifiez une lingette avec SanoClean Forte (solution à 20 %).

**Dosage pour des surfaces lisses: 30-50 ml/m<sup>2</sup>**

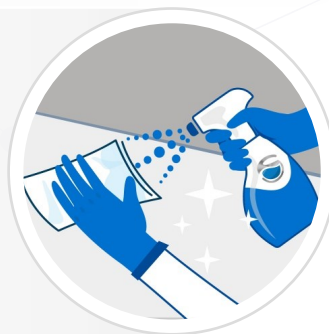


## ÉTAPE 3

Humidifiez la surface à désinfecter avec la lingette afin d'obtenir un film humide ininterrompu et uniforme sur toute la surface. Éviter de former des flaques. Si des gouttes ou des flaques apparaissent sur des surfaces lisses, étalez-les à l'aide de la lingette.



## ÉTAPE 4

Laissez le produit sécher. Temps nécessaire: **environ 15 minutes.**

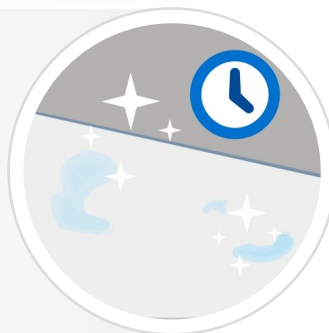

SanoClean Forte S



## EFFICACITÉ

**NORMES / TEMPS DE CONTACT**  
(pour une solution à 20 %)

### BACTÉRIES

**Bactéricide:**

EN 1276: charge élevée: 5 min

EN 13697: charge élevée: 15 min

### LEVURES

**Levuricide:**

EN 1650: charge élevée: 30 min

EN 13697: charge élevée: 5 min

### CHAMPIGNONS

**Fongicide:**

EN 1650: charge élevée: 30 min

EN 13697: charge élevée: 30 min

### VIRUS

**Virucide: (grippe A \*)**

EN 14476:2013+A1:2015:

charge élevée : 30 s

**Virucide à effet limité: virus enveloppés \***

EN 14476:2019, charge faible : 1 min

**Indication:** Éviter, autant que possible, la formation d'aérosol lors de la pulvérisation directe avec un appareil. Si vous utilisez ce produit sur des surfaces plus importantes que lors d'un usage ménager ordinaire ou plus de 30 minutes par jour, vous devez porter un masque de protection respiratoire pour éviter d'irriter les voies respiratoires.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE

**SANOSIL AG** \* CH-8634 Hombrechtikon \* Suisse  
E-Mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com) \* Web: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)  
[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



# DÉSINFECTION DE SURFACE

avec des Sano Wipes

Sano Wipes are dry wipes in a practical dispenser bucket with a resealable lid. They are soaked with SanoClean Forte S (20% solution) before use and are then ready for use for several weeks. Soaked SanoWipes are ideal for the fast intermediate disinfection of smaller surfaces.



## ÉTAPE 1

Enfilez des gants. (Consigne de sécurité fondamentale pour l'utilisation du désinfectant.)

## ÉTAPE 2

Enlevez la pellicule protectrice du rouleau de lingettes et placez ce dernier dans le seau.



## ÉTAPE 3

Imbibez le rouleau avec le SanoClean Forte S (solution à 20 %). **Dosage : 1 à 1,2 l par rouleau.**



## ÉTAPE 4

Tirez la première lingette à travers l'orifice de distribution et fermez correctement le couvercle transparent. (Indication : les lingettes peuvent légèrement se décolorer avec le temps sous l'effet de la lumière, ceci n'altère cependant en rien leur qualité.)



## ÉTAPE 5

Prenez une lingette Sano Wipe imbibée de produit et essuyez soigneusement à plusieurs reprises la surface à désinfecter. Ce faisant, veillez à porter des gants, de façon à éviter de vous assécher la peau, SanoClean Forte S ayant un fort pouvoir dégraissant.



SanoWipes



## DONNÉES

### MATÉRIAU

PET— optimisé pour l'application de liquides

### NOMBRE DE LINGETTES PAR ROULEAU

90

### DIMENSIONS DES LINGETTES

36 x 20 cm



**Indication:** Après avoir rempli le seau pour les lingettes Sano Wipes, apposez toujours une étiquette autocollante donnant des indications sur le produit contenu à l'intérieur. Des étiquettes appropriées sont disponibles sur demande auprès de nos services.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

**SANOSIL AG** \* CH-8634 Hombrechtikon \* Suisse  
E-Mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com) \* Web: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)  
[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



# DÉSINFECTION DES SOLS

avec un balai-vaporisateur

**Indication:** Il est également possible d'humidifier préalablement la tête d'un simple balai serpillière au lieu de recourir à un système de balai-vaporisateur. Pour les plus grandes surfaces (par ex. les tapis de sport), il s'avère en outre efficace d'utiliser un pulvérisateur manuel performant pour pulvériser le produit et de l'essuyer ensuite à l'aide du balai serpillière.

## ÉTAPE 1

Nettoyer la surface à traiter de toute saleté non adhérente. Plus la surface sera propre, plus la désinfection sera efficace.

## ÉTAPE 2

Remplissez le réservoir d'un balai serpillière adapté avec le SanoClean Forte S (solution à 20 %).

## ÉTAPE 3

Humidifiez la surface à l'aide de l'applicateur de façon à former un film humide uniforme qui va sécher en quelques minutes. Laissez le produit agir / sécher.



# DÉSINFECTION DE PETITES PIÈCES

(Joints, joints toriques, etc.)



## ÉTAPE 1

Nettoyez les pièces à traiter au lave-vaisselle, si possible, ou à la main.

## ÉTAPE 2

Remplissez un récipient avec le SanoClean Forte S (solution à 20 %) et plongez-y les pièces. Retirez-les après quelques minutes et laissez-les sécher. Tant que le SanoClean Forte S ne contient pas d'impuretés, la solution peut être utilisée plusieurs fois.

### Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant toute utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Nos recommandations en matière d'application, écrites ou orales, sont le fruit d'un grand nombre d'essais. Nos conseils se basent sur l'état le plus avancé des connaissances actuelles. Ils sont cependant donnés sans engagement de notre part puisque nous n'avons aucune influence directe sur l'utilisation et le stockage. Les descriptions de produits ou les données sur les propriétés des préparations n'engagent pas notre responsabilité en cas d'éventuels dommages.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

**SANOSIL AG** \* CH-8634 Hombrechtikon \* Suisse  
E-Mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com) \* Web: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)  
[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)





**SANOSIL AG**

CH-8634 Hombrechtikon  
Suisse

E-mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

