



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 



Désinfection à l'aide d'un aérosol Sanosil

Procédure

Avant la nébulisation:




1. Préparer la pièce

Condamner l'accès à la pièce, pour son usage habituel, pour toute la durée de la désinfection et s'assurer qu'il n'y a pas besoin de la pièce pour autre chose pendant cette même durée.

2. Nettoyage et désinfection

Nettoyer soigneusement la pièce et désinfecter les surfaces plus fortement contaminées telles que les points de contact en les essuyant à la main.

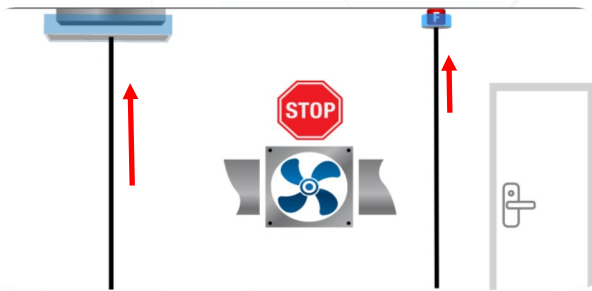



3. Fermer hermétiquement la pièce

Couper la ventilation / les climatisations, fermer les fenêtres et les ouvertures.

Si nécessaire: apposer des plaques de protection télescopiques sur les orifices de ventilation et les détecteurs de fumée.

4. Déterminer le volume de la pièce

Mesurer la taille de la pièce et définir le volume de la pièce en m^3 (longueur x largeur x hauteur de la pièce). Déduire du volume total le volume occupé par le mobilier (le résultat est nécessaire pour programmer l'appareil de désinfection).

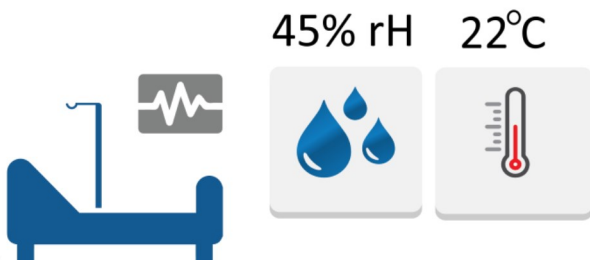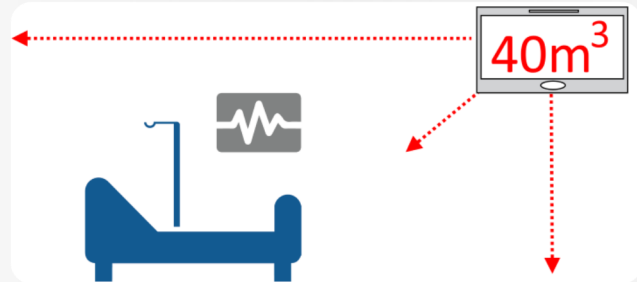

5. Contrôle climatique

Contrôle des conditions climatiques initiales.

Idéalement : humidité relative 45 à 55 %, température 20 à 22 degrés Celsius.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 


SANOSIL AG * CH-8634 Hombrechtikon * Suisse
E-Mail: service@sanosil.com * Web: www.sanosil.com
www.sanosil.com



Pendant la nébulisation:

1. Mettre en place l'appareil et le démarrer

Mettre en place l'appareil à aérosol de façon adéquate, veiller à un écartement suffisant entre le cône de pulvérisation et les murs, le plafond ainsi que l'équipement. S'assurer qu'il n'y a plus personne dans la pièce en dehors de la personne en charge de la désinfection. Remplir l'appareil, le programmer en respectant les instructions et actionner le dispositif de démarrage. Quitter aussitôt la pièce.

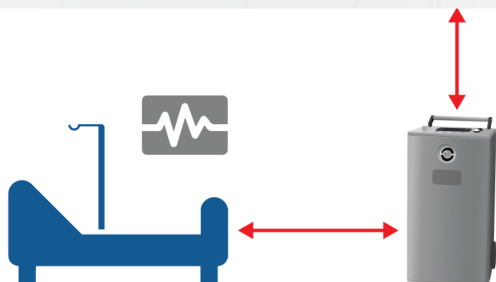

2. Sceller les portes

Fermer les portes après avoir quitté la pièce et colmater éventuellement les fissures à l'aide de ruban adhésif.



3. Apposer des signaux d'avertissement


Apposer un panneau indiquant l'heure du début du programme de désinfection ainsi que le temps de contact minimal.

Ajouter un panneau d'avertissement sur la poignée de porte, faire en sorte d'éviter toute ouverture involontaire.



4. Procéder à la désinfection

Laisser le programme automatique de désinfection se dérouler intégralement. Maintenir toutes les portes et toutes les fenêtres fermées pendant la désinfection, la climatisation et les ventilations restent coupées.

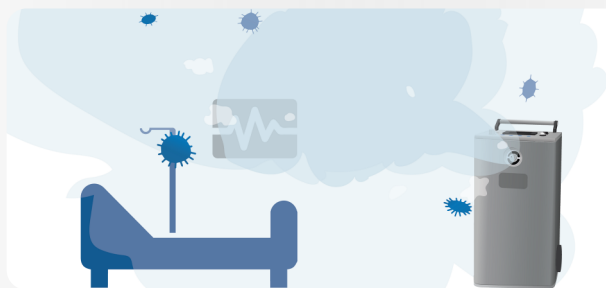

5. Maintenir la pièce fermée

Maintenir la pièce fermée et ne pas y entrer pendant toute la durée de la nébulisation et du temps de contact nécessaire (au moins 120 minutes).




SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG * CH-8634 Hombrechtikon * Suisse
E-Mail: service@sanosil.com * Web: www.sanosil.com
www.sanosil.com



Après la nébulisation:

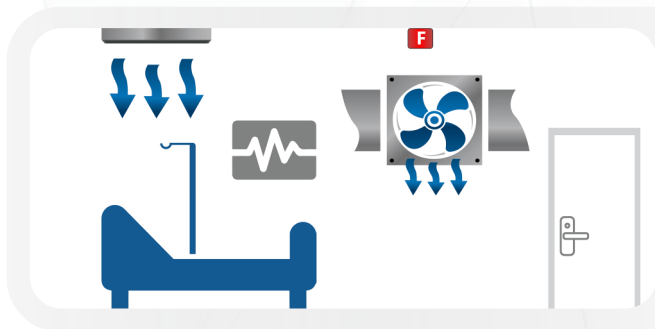

1. Mettre la ventilation en marche


Une fois le temps de contact écoulé, enlever les plaques de protection éventuellement mises en place et remettre la ventilation en marche.

(Ceci n'est pas nécessaire, en général, si on a laissé le produit agir toute une nuit.)

2. Réaliser les contrôles et libérer la pièce

Contrôler la teneur en H_2O_2 dans l'air. Si la valeur est en-deçà des limites légales, la pièce peut être libérée et à nouveau utilisée.

(Ceci n'est pas nécessaire, en général, si on a laissé le produit agir toute une nuit.)

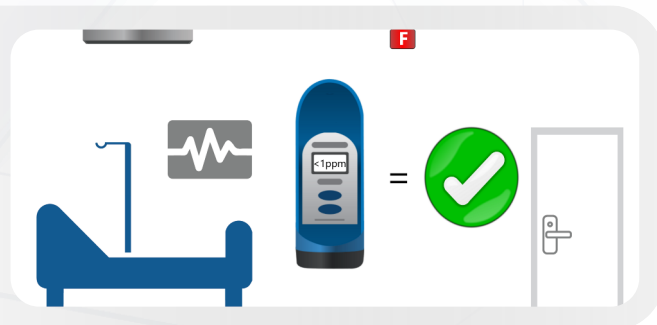

3. Utiliser à nouveau la pièce


Utiliser à nouveau la pièce sans restriction.



(4. Réaliser la maintenance de l'appareil aérosol)

Contrôler l'appareil à aérosol, le nettoyer si nécessaire et/ou réaliser sa maintenance.

Ranger l'appareil de façon sécurisée jusqu'à sa prochaine utilisation.

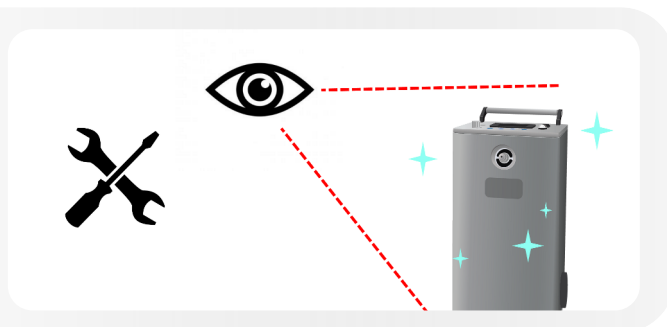

SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG * CH-8634 Hombrechtikon * Suisse
E-Mail: service@sanosil.com * Web: www.sanosil.com
www.sanosil.com

